

CAGE ACIF IMPRESSO EM 3D EM TITÂNIO

CAGES IMPRESSOS
EM 3D



Hexanium® ACIF



TÉCNICA CIRÚRGICA

SPINEVISION

INNOVATION THAT MATTERS

PASSOS CIRÚRGICOS

I	.. Posicionamento do paciente e discectomia.	02
II	.. Montagem e inserção dos pinos.	03
III	.. Colocação do distrator/compressor e distração segmentar.	05
IV	.. Preparação das placas terminais.	07
V	.. Estimação do tamanho do implante.	08
VI	.. Montagem do segurador de cage e ligação do cage.	09
VII	.. Preenchimento do cage com enxerto ósseo.	11
VIII	.. Inserção do cage.	12
IX	.. Preparação do orifício piloto.	13
X	.. Perfuração (opcional).	15
XI	.. Inserção do parafuso.	17
XII	.. Libertação final do cage.	19
XIII	.. Remoção do cage (opcional).	21

REFERÊNCIAS

1	.. Instrumentos.	24
2	.. Implantes.	28

POSICIONAMENTO DO PACIENTE E DISCECTOMIA



O paciente é posicionado na mesa da sala de operações utilizando a posição padrão para o procedimento de fusão intersomática cervical anterior: posição supina com manutenção da lordose cervical.



O raio X deve ser utilizado durante todo o procedimento: para confirmar a identificação do disco afetado, o correto posicionamento do dispositivo de prova e a posição final do cage Hexanium ACIF.

Depois de bem identificado o nível operatório correto, use a abordagem anterior padrão para a coluna cervical, prestando atenção para não danificar tecidos moles ao colocar retratores e / ou distratores.

Uma vez retraídas as estruturas prévertebrais, use os métodos padrão normalmente utilizados na discectomia anterior.

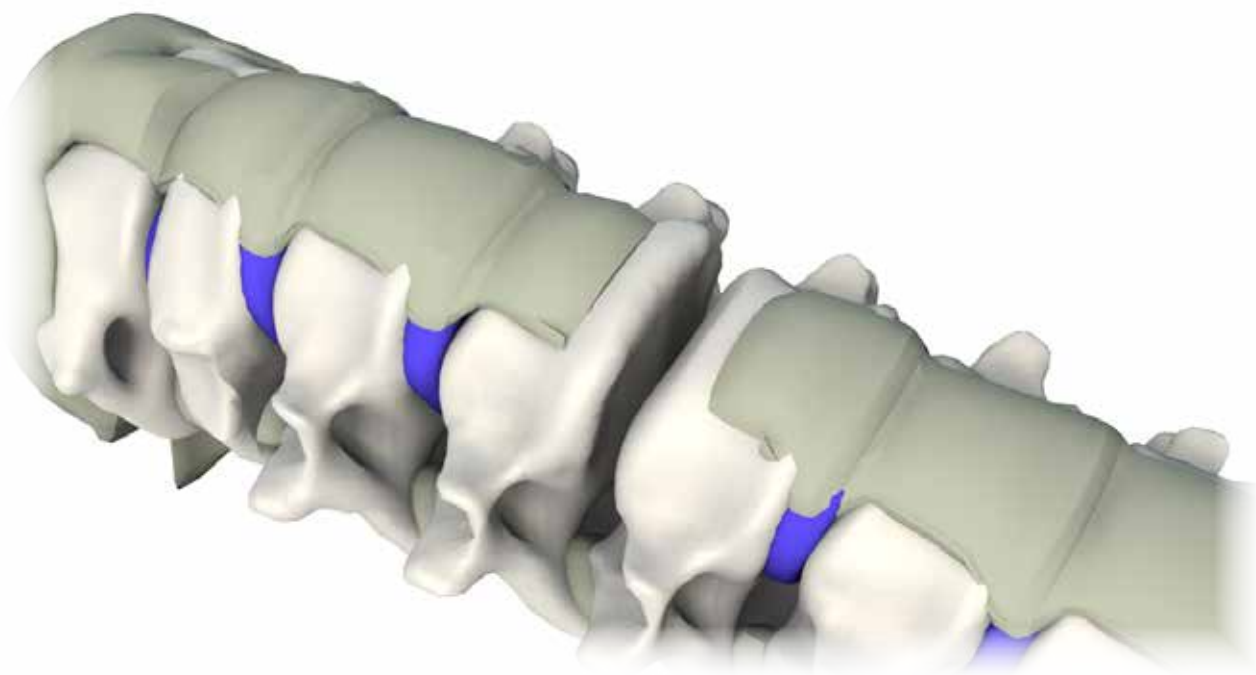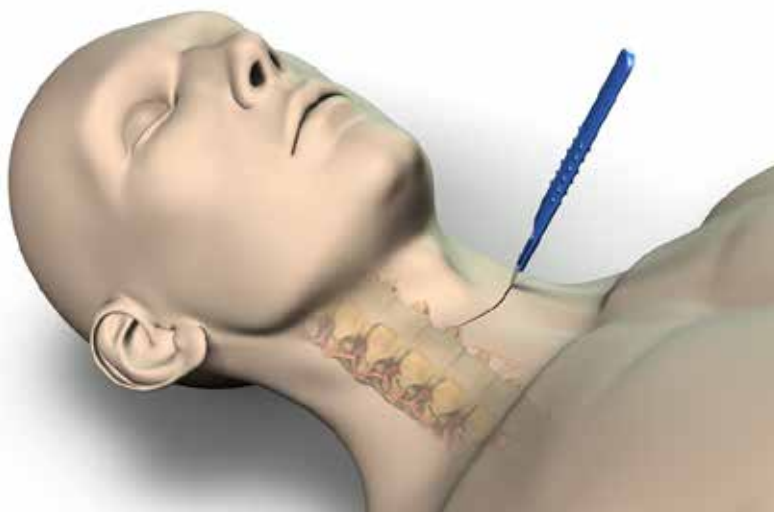

MONTAGEM E INSERÇÃO DOS PINOS



Pinos para Distrator/Compressor
AC2-A206




Chave para Pinos
AC2-A216

Para conectar os pinos para distrator/compressor AC2-A206 com a chave para pinos AC2-A216, insira a parte proximal (sem


ponta hexagonal) dos pinos dentro do tubo externo da chave para pinos.





Preste atenção para que a parte hexagonal do pino fique totalmente inserida na chave para pinos.

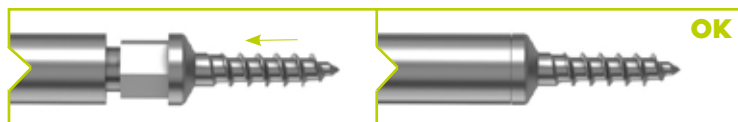

Insira o pino para distrator/compressor diretamente no corpo vertebral. O orifício de entrada do pino deve estar na linha média e no centro sagital do corpo vertebral. Insira o pino até ficar totalmente inserido no corpo vertebral.

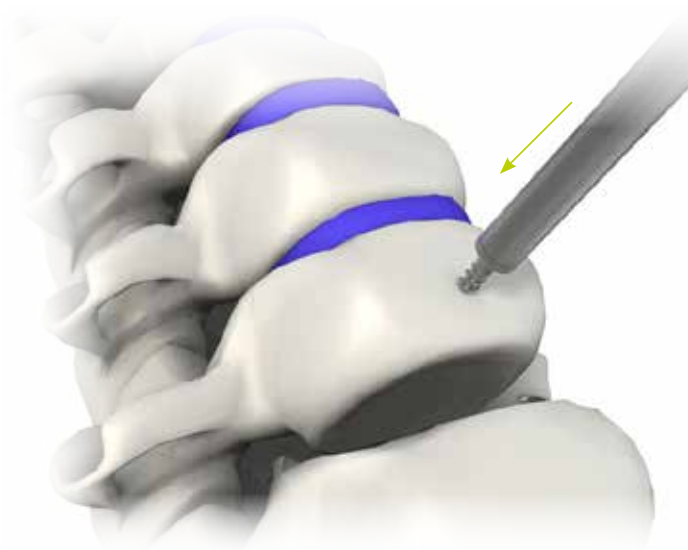


Quando o pino estiver totalmente inserido, desconecte a **chave para pinos** puxando-a para cima, deixando o pino no corpo vertebral.

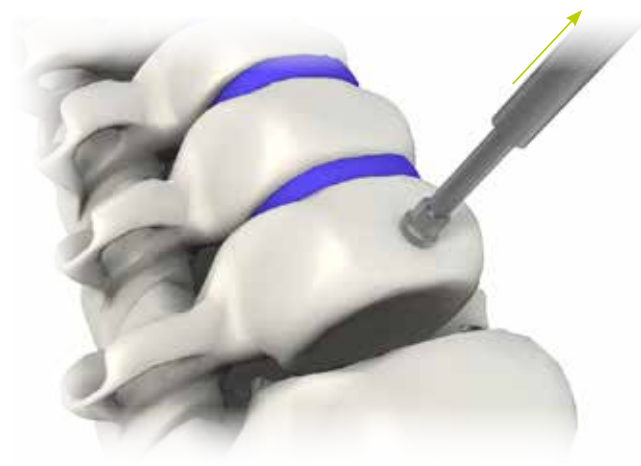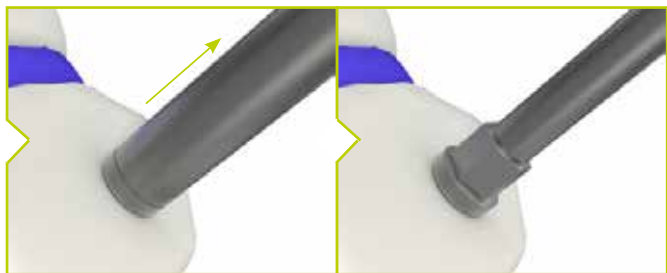

O segundo **pino para distrator/compressor** deve ser colocado no corpo vertebral da vértebra inferior do nível operado. Os pinos devem estar sagitalmente alinhados na linha média.

Conecte o segundo pino com a chave para pinos, tal como descrito acima e insira-o completamente no corpo vertebral.

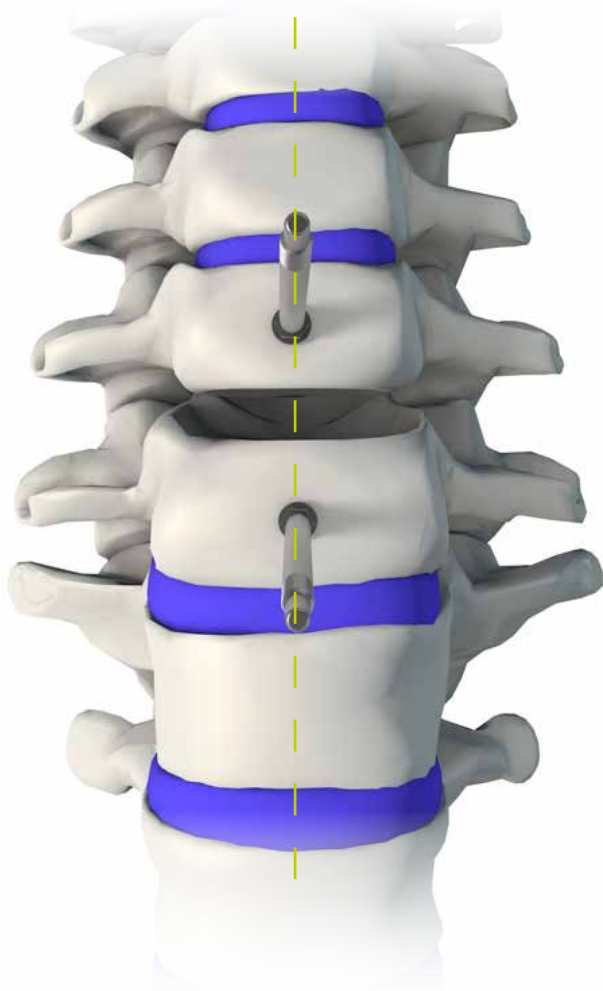

COLOCAÇÃO DO DISTRATOR/COMPRESSOR E DISTRAÇÃO SEGMENTAR




Distrator/Compressor
AC2-A201




Plugues para Pinos
AC2-A210

Hexanium ACIF oferece um único **distractor/compressor** AC2-A201 permitindo quer a distração **D** quer a compressão **C**.


A distração segmentar é obrigatória para restaurar a altura dos discos e assegurar uma colocação segura e precisa do cage.

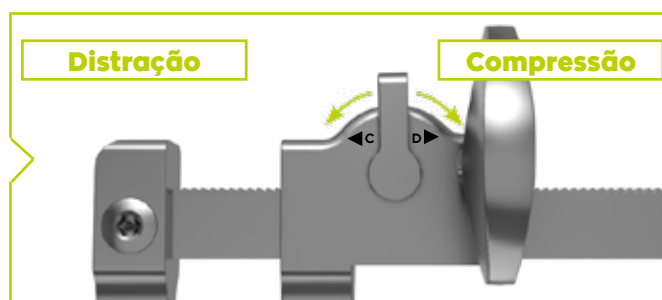




Posicione o «braço» pivotante do **distractor/compressor** sobre a parte livre dos pinos para **distractor/compressor** AC2-A206 e deslize os braços do distractor/compressor para baixo e ao longo dos pinos.

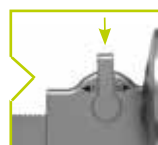

Coloque o D/C na posição neutra para ajustar o «espaçamento» entre os braços do D/C e facilitar a colocação do D/C.

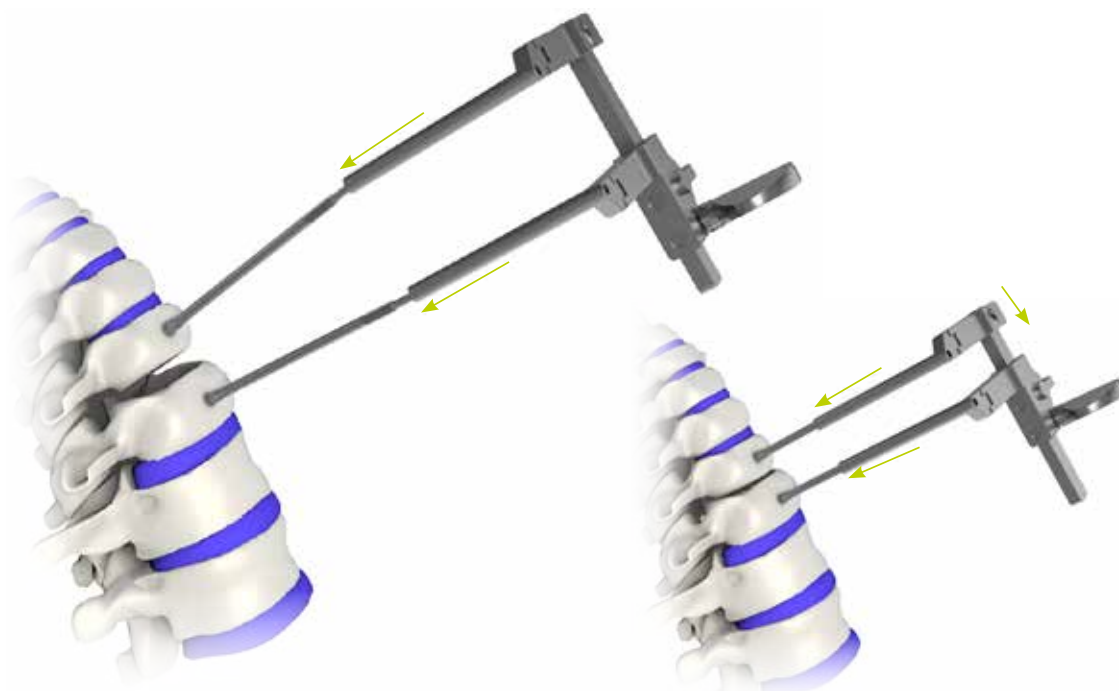


Uma vez em posição, coloque um **plug para pinos** AC2-A210 em cada um dos pinos: enrosque o plug na extremidade proximal livre dos pinos.

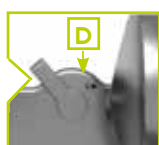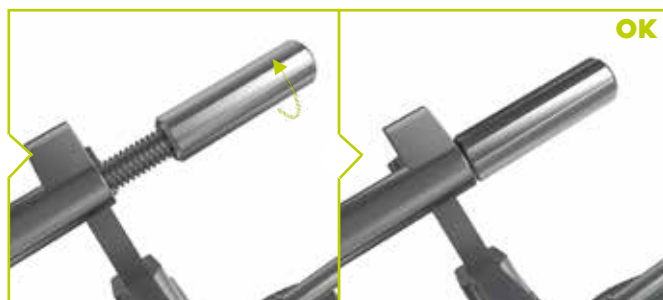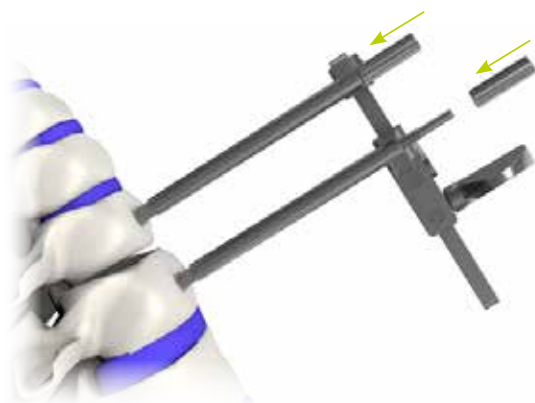

Para alargar o espaço intervertebral antes da colocação do cage, coloque o **distrator/compressor** AC2-A201 on distraction position **D**.

A distração segmentar é obrigatória para restaurar a altura dos discos e assegurar um bom acesso ao nível afetado.

Rode o manípulo (borboleta) do D/C no sentido horário para alargar o espaço intervertebral até atingir a altura desejada.

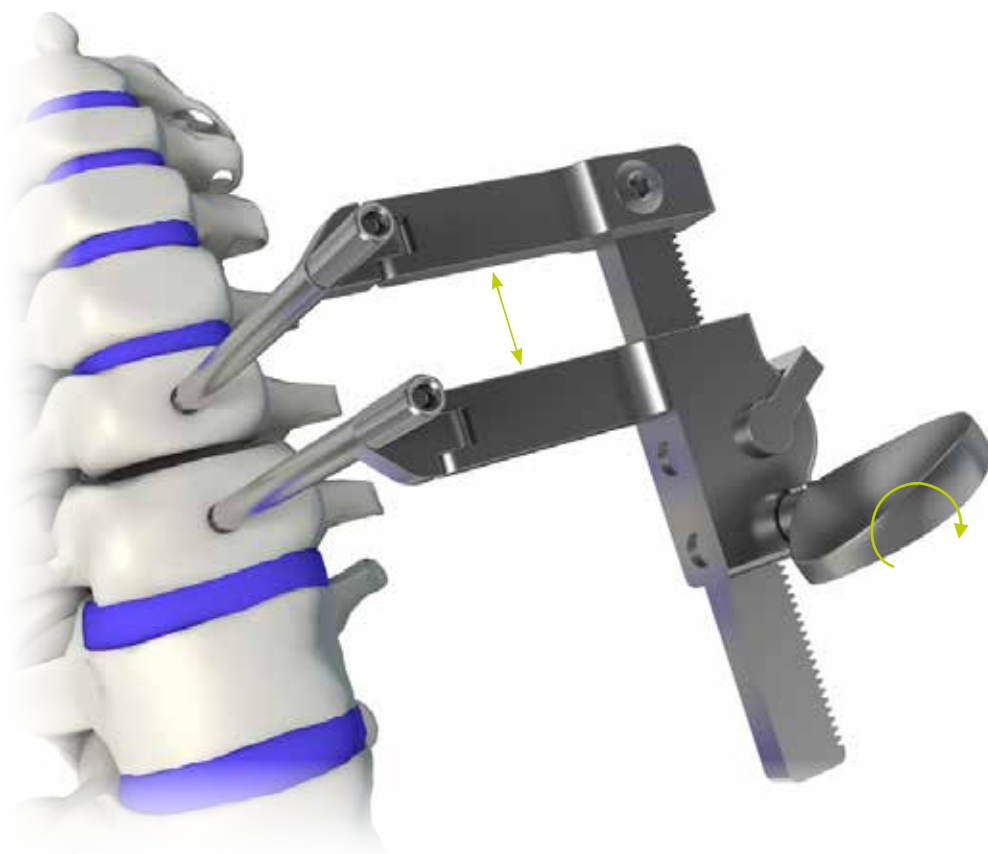





Raspador
AC2-A010

Uma vez executada a distração do espaço intervertebral, use o **raspador AC2-A010** para preparar as placas terminais. Entre no espaço intervertebral colocando o raspador paralelamente às placas terminais e use-o para remover o tecido cartilaginoso superficial das placas terminais.

O raspador é utilizado para expor o osso em sangramento e assegurar uma boa vascularização do Hexanium ACIF.

A remoção excessiva de osso subcondral pode enfraquecer a placa terminal vertebral. Se a placa terminal for toda removida, pode resultar em subsidência e perda de estabilidade segmentar.

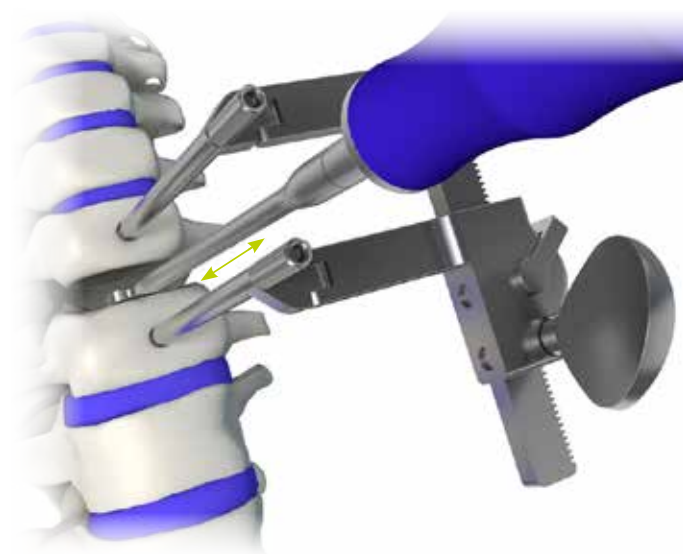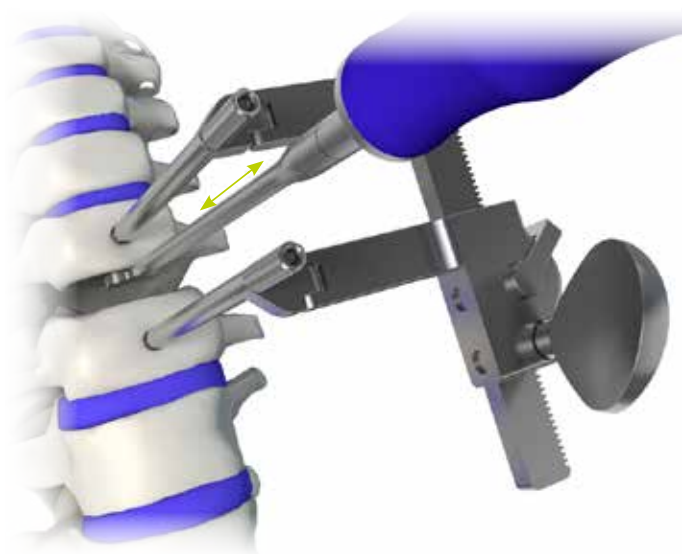



ESTIMAÇÃO DO TAMANHO DO IMPLANTE



Prova de Cage Cervical Convexo ou Lordótico Ti
AC2-A011-XXXX

OU



Prova de Cage Cervical Convexo ou Lordótico Ti Sem Trava
AC2-A012-XXXX



Martelo
AC2-A023

Uma vez concluída a preparação das placas terminais e exposto o osso em sangramento, use a **prova de cage cervical convexo ou lordótico Ti** (ou **Sem Trava**) **AC2-A011-XXXX** (ou **AC2-A012-XXXX**). Estão disponíveis provas correspondentes às três pegadas diferentes (pequena, média e grande, que oferecem um tamanho de prova diferente em cada uma das extremidades).

Um anel codificado por cor em função da pegada e do formato do cage é utilizado em cada extremidade da prova, para ajudar na identificação das provas. Em caso de dúvida, verifique a referência da prova.

CÓDIGO DE CORES PARA AS PROVAS

PEQUENO e CUNEIFORME



MÉDIO e CUNEIFORME



GRANDE e CUNEIFORME



PEQUENO E CONVEXO



MÉDIO E CONVEXO



GRANDE E CONVEXO



EXPLICAÇÃO DA REFERÊNCIA

AC2-A01X-**XXXX**


Tamanho das pegadas : X = S (pequeno) / M (médio) / L (grande)

Altura : **XX** = **05** / **07** / **09** / **11** com duas alturas diferentes em ambos os lados da prova. (por ex. : XX = 05 para altura 05 e 06)

Tipo : **X** = **L**: CUNEIFORME / **C**: CONVEXO

Insira a **prova de cage cervical Ti** (dando **ligeiras pancadas com o martelo AC2-A023** na extremidade proximal, se necessário) até ficar precisamente no espaço intervertebral e o stop tocar na margem anterior das vértebras superior e inferior.

Recomenda-se que comece por uma prova de altura mínima e continue com provas de maior altura até atingir a altura ideal do disco.

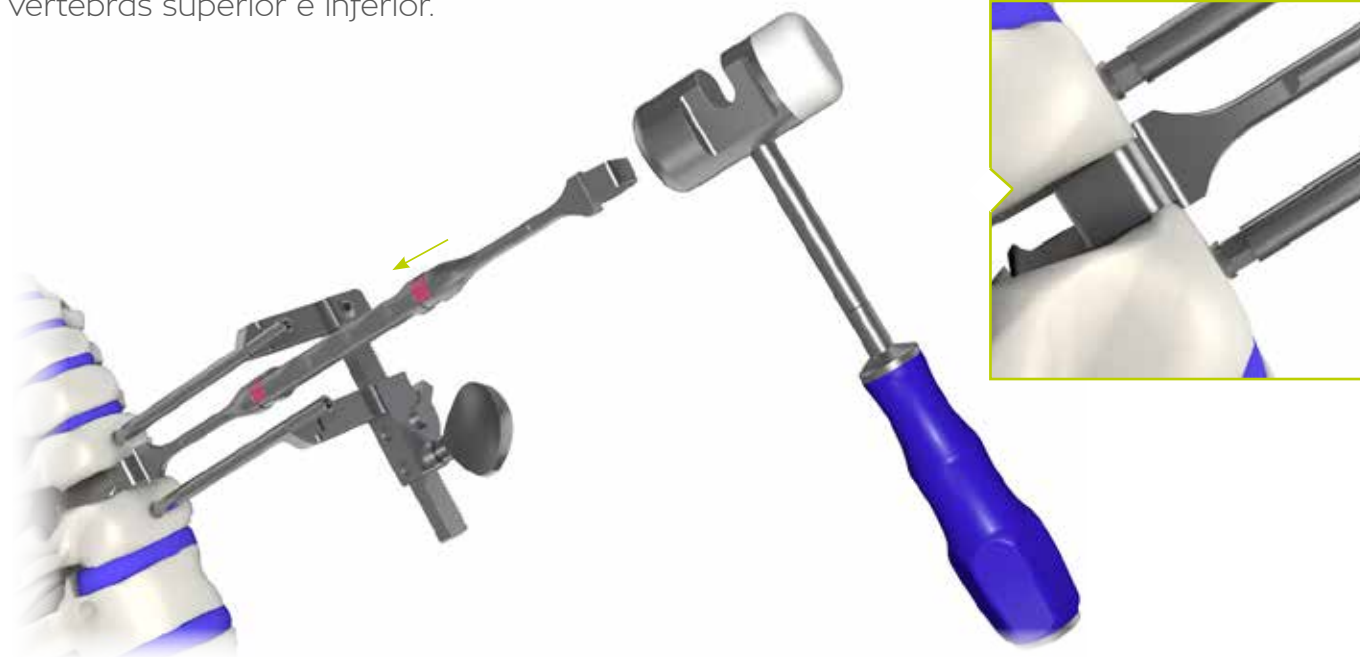

MONTAGEM DO SEGURADOR DE CAGE E LIGAÇÃO DO CAGE



Bastão Interno para Segurador de Cage Cervical Ti
AC2-A002



Segurador de Cage Cervical SA Ti com Guia
AC2-A001G-XX

..... OU



Segurador de Cage Cervical Ti
AC2-A001

OU




Segurador de Cage Cervical Ti Sem Trava
AC2-A003

O kit Hexanium ACIF vem com três opções para segurar o cage: o **segurador de cage cervical SA Ti com guia AC2-A001G-XX** com guia integrado adaptado à altura de cada implante (XX = Altura de 05 a 12) e o

segurador de cage cervical Ti AC2-A001 ou o **segurador de cage cervical Ti Sem Trava AC2-A003** sem guia, nem especificação de altura.


Antes de conectar o cage (aplicando-se a ambos os seguradores de cage), insira o **bastão interno para segurador de cage cervical Ti AC2-A002** no segurador de cage.

Quando sentir resistência, rode o botão do bastão interno no sentido horário até este chegar à extremidade proximal do cabo do segurador de cage.


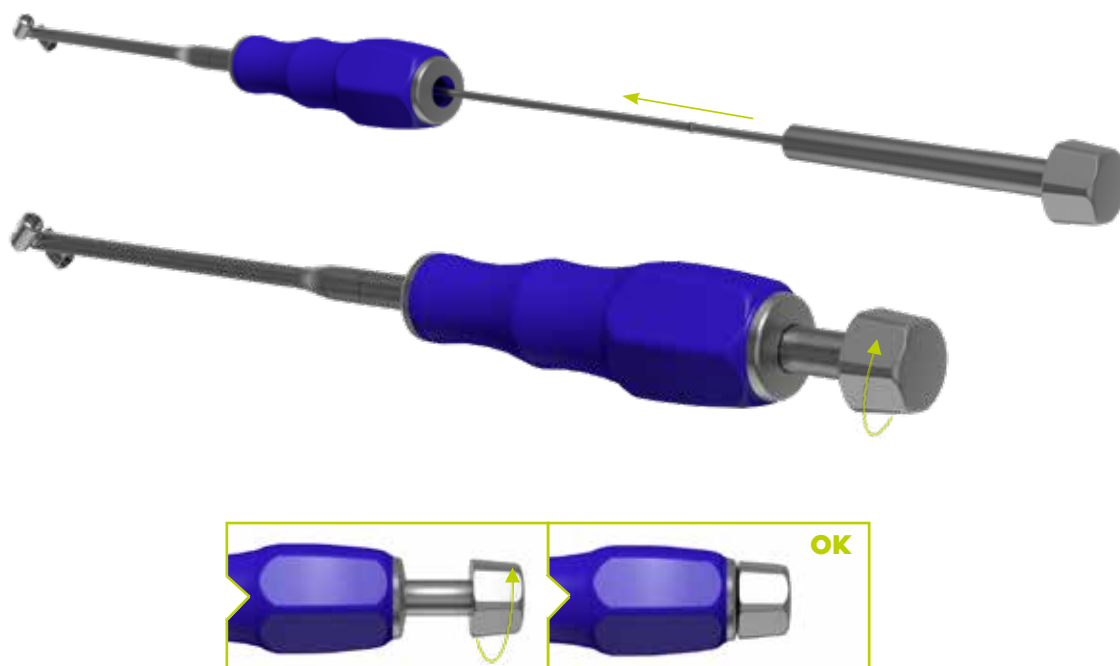


Cage cervicale Ti SA
AC2-CSXXXX

1 Para conectar o Hexanium ACIF correspondente à última prova usada (em função de: lordótico ou convexo / pegada e altura), coloque a extremidade distal do segurador de cage escolhido encostada à abertura central do **cage cervical SA Ti AC2-CSXXXX** encaixando a parte roscada do **bastão interno para segurador de cage cervical Ti AC2-A002**.

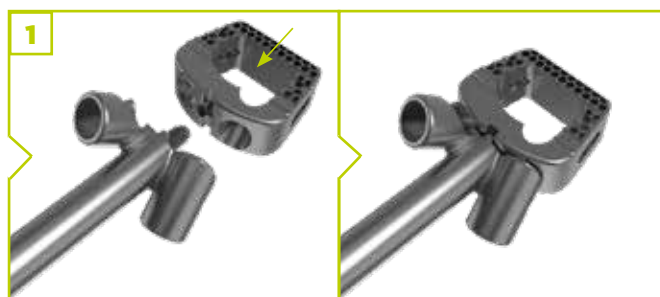

2 Depois, rode o botão do bastão interno no sentido horário até este tocar na extremidade proximal do cabo do segurador de cage e não conseguir apertar mais o botão.

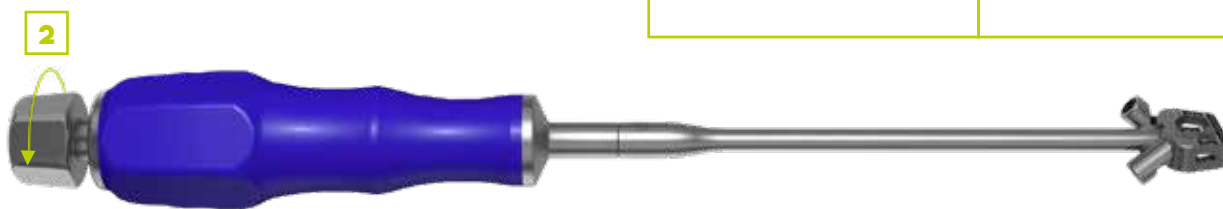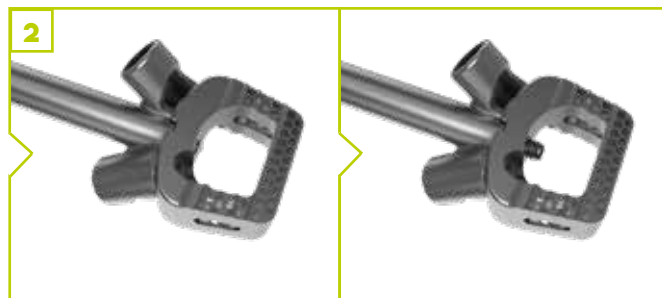

VII

CAGE BONE GRAFT FILLING



Bloco de Compactação de Enxerto em Cage Cervical Ti
AC2-A020



Impactador de Osso Esponjoso em Cage Cervical Ti
AC2-A021



Cage conectado ao Segurador de Cage (ou Segurador de Cage Sem Trava)
AC2-CSXXXX + AC2-A001 (or AC2-A003) + AC2-A002

..... OU



Cage conectado ao Segurador de Cage com Guia
AC2-CSXXXX + AC2-A001G-XX + AC2-A002

Para compactar um pouco de enxerto ósseo no **cage cervical SA Ti AC2-CSXXXX**, coloque o cage no **bloco de compactação de enxerto em cage cervical Ti AC2-A020** de acordo com a pegada do cage escolhido (Pequena: 15*12, Média: 17*14 ou Grande: 15*19).

Adicione um pouco de enxerto ósseo na câmara de enxerto ósseo do cage e sobre os canais hexagonais no cage. Depois, use o **impactador de osso esponjoso em cage cervical Ti AC2-A021** para compactar o

enxerto ósseo dentro do cage. Repita este passo até atingir a quantidade desejada de enxerto ósseo.





Martelo
AC2-A023



..... OU



Cage conectado ao Segurador de Cage (ou
Segurador de Cage Sem Trava)

AC2-CSXXXX + AC2-A001 (or AC2-A003) + AC2-A002

Cage conectado ao Segurador de Cage com Guia

AC2-CSXXXX + AC2-A001G-XX + AC2-A002

Para inserir o cage no espaço do disco intervertebral, posicione o segurador de cage de modo a que o cage fique paralelo às placas terminais antes da inserção.



Insira o Hexanium ACIF no disco intervertebral até atingir a posição correta. Pode usar o **martelo AC2-A023** para aplicar ligeiras pancadas no botão do **bastão interno para segurador de cage cervical Ti AC2-A002**.





O correto posicionamento do cage deve ser sempre confirmado por raio x antes de se avançar mais no procedimento.



PREPARAÇÃO DO ORIFÍCIO PILOTO



Sovela Óssea
AC2-AO30

..... OU



Sovela Óssea Angulada
AC2-AO31

..... OU



Sovela Curta Óssea Angulada
AC2-AO38



Cabo Cilíndrico de Engate Rápido
SD-ALSH26123PCAO

O kit Hexanium ACIF oferece três opções de sonda óssea: uma **sonda óssea** reta AC2-AO30, uma **sonda óssea angulada** AC2-AO31 e uma **sonda curta óssea angulada** AC2-AO38.

Para conectar uma ou a outra sonda óssea ao cabo cilíndrico de engate rápido SDALSH26123PCAO:

1 Puxe o anel do cabo de silicone na direção da parte de silicone.

2 Mantendo essa posição, insira a parte proximal da sonda óssea no cabo.

3 Liberte o anel do cabo para fixar a ligação entre os dois instrumentos.


1



2



3

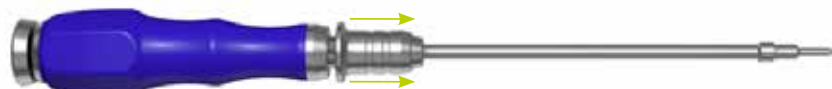

Anel ou botão amarelo indica instrumentos NÃO compatíveis com segurador de cage com guia



Sovela Óssea conectada ao Cabo
AC2-A030 + SD-ALSH26123PCAO

..... OU



Sovela Óssea Angulada conectada ao Cabo
AC2-A031 + SD-ALSH26123PCAO

..... OU





Sovela Curta Óssea Angulada conectada ao Cabo
AC2-A038 + SD-ALSH26123PCAO



Martelo
AC2-A023

Para preparar o ponto de entrada para os parafusos, insira a parte distal da **sovela óssea reta** ou **angulada** ou **curta angulada** **AC2-A030** ou **AC2-A031** ou **AC2-A038** no segurador de cage com guia.

Quando a ponta da sovela óssea tocar na placa terminal, aplique ligeiras pancadas no cabo com o **martelo AC2-A023** até a sovela óssea ficar totalmente inserida no guia.

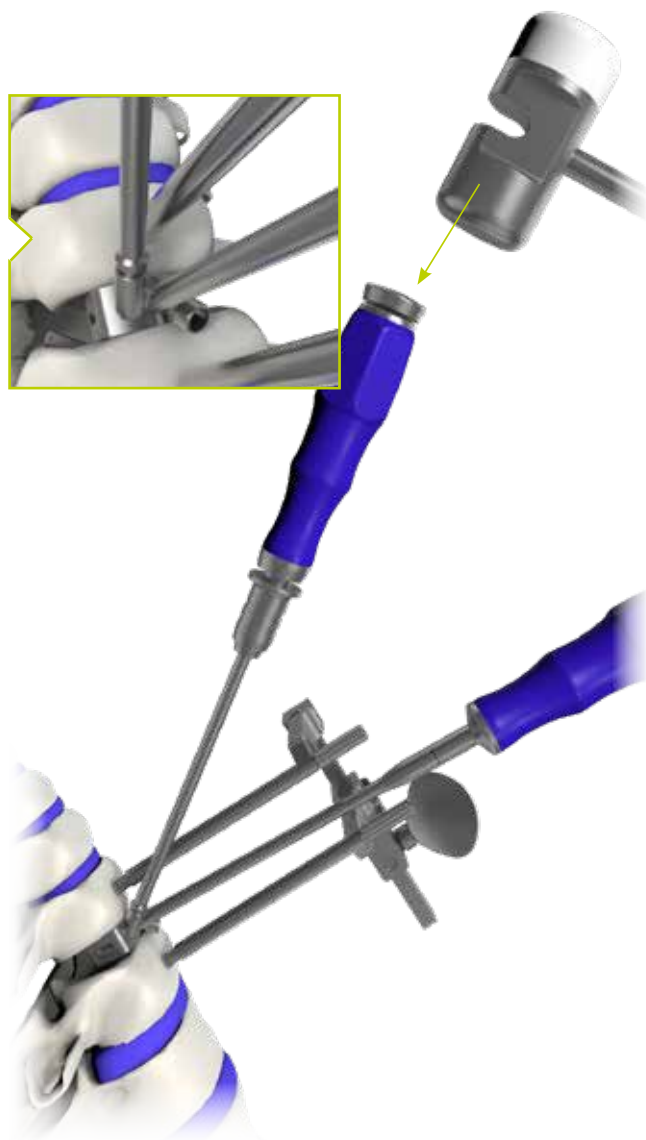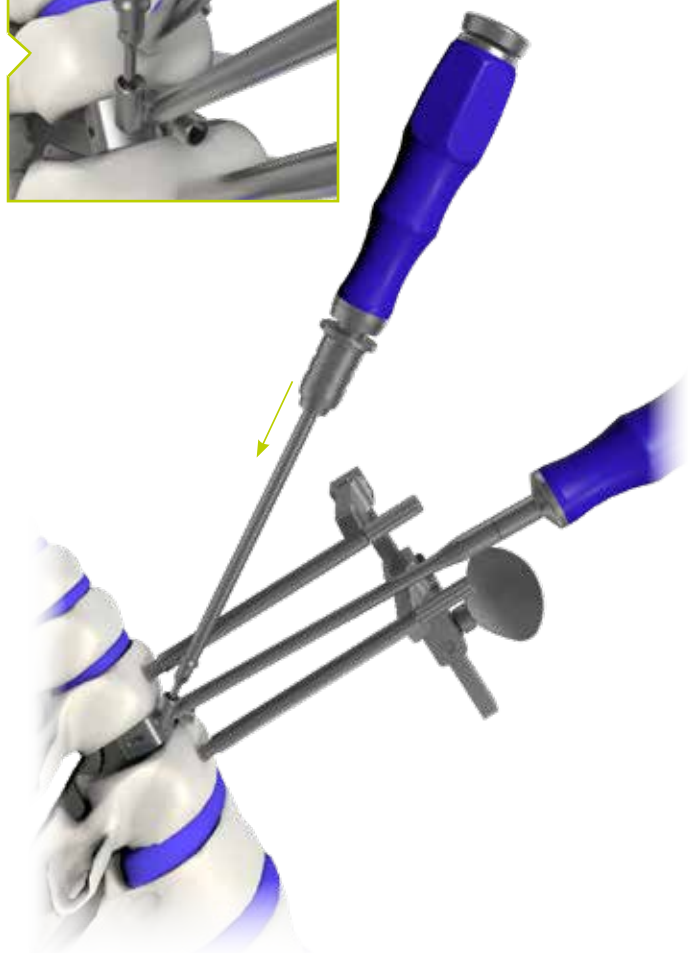



PERFURAÇÃO (OPCIONAL)



Cabo Cilíndrico de Engate Rápido
SD-ALSH26123PCAO



Broca Reta
AC2-A032

..... OU



Manga para anclaje U
AC2-A036

+



Broca Angulada
AC2-A033

..... OU



Manga curta de anclaje U
AC2-A041

+



Broca Curta Angulada
AC2-A039

O kit Hexanium ACIF oferece três instrumentos de perfuração: uma **broca reta AC2-A032**, uma **broca angulada AC2-A033** e uma **broca curta angulada AC2-A039** que podem ser montados respectivamente com a **Manga para anclaje U AC2-A036** ou a **Manga curta de anclaje U AC2-A041**.

Para montar a manga com sua broca correspondente (Manga para anclaje U AC2-A036 e broca angulada AC2-A033 ou Manga curta de anclaje U AC2-A041 e Broca curta angulada AC2-A039):

1 Coloque a ponta da broca na parte distal da manga, e deixe o bastão da broca dentro da meia-manga.


2 Deslize a segunda parte da manga ao longo da primeira parte, enquanto pressiona o botão da manga, até que ela se conecte. Solte o botão quando conectado.

3 Conecte ao **cabo cilíndrico de engate rápido SDALSH26123PCAO** (veja os detalhes na página 13).

1



2

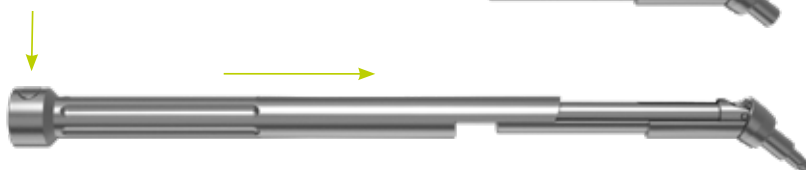

Versões curtas de instrumentos são identificadas por um anel ou botão amarelo

Por favor, tenha em atenção que os parafusos do Hexanium ACIF são parafusos auto-perfurantes, sendo o passo de perfuração opcional.



Broca conectada ao Cabo
AC2-A032 + SD-ALSH26123PCAO

..... OU



Broca Angulada com manga conectada ao Cabo
AC2-A033 + AC2-A036 + SD-ALSH26123PCAO





..... OU



Broca Angulada com manga curta conectada ao Cabo
AC2-A039 + AC2-A041 + SD-ALSH26123PCAO

Para preparar o orifício para os parafusos, insira a **broca AC2-A032** ou a **broca angulada AC2-A033** montada com a **Manga para anclaje U AC2-A036**, ou a **broca curta angulada AC2-A039** montada com a **Manga curta de anclaje U AC2-A041** no guia/segurador.

Quando a ponta da broca tocar na placa terminal **1**, rode no sentido horário para fazer o orifício no corpo vertebral. Continue a perfurar até a broca ficar totalmente inserida no guia **2**, e depois rode no sentido anti-horário para remover a broca.

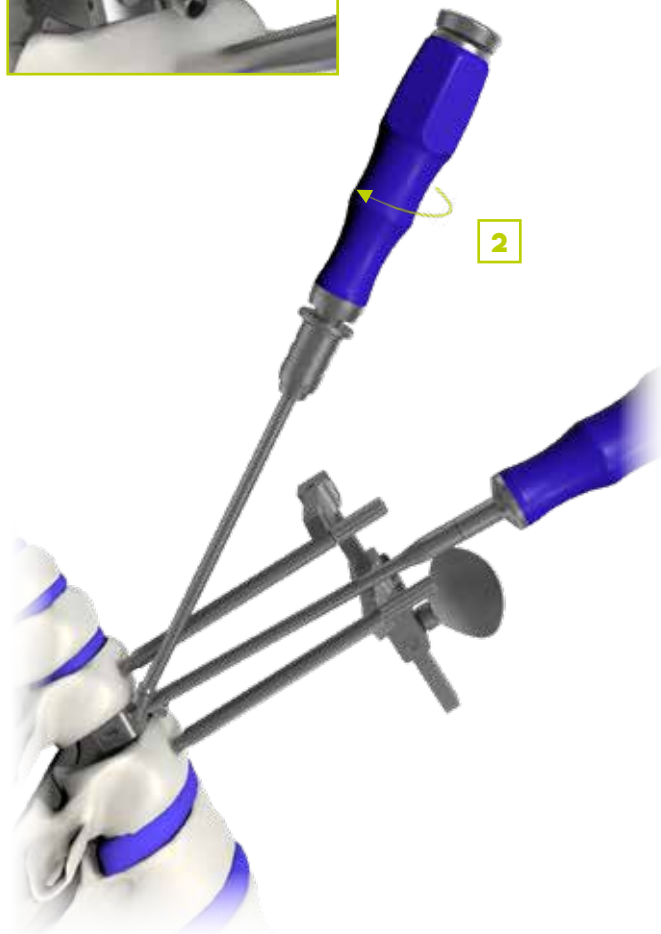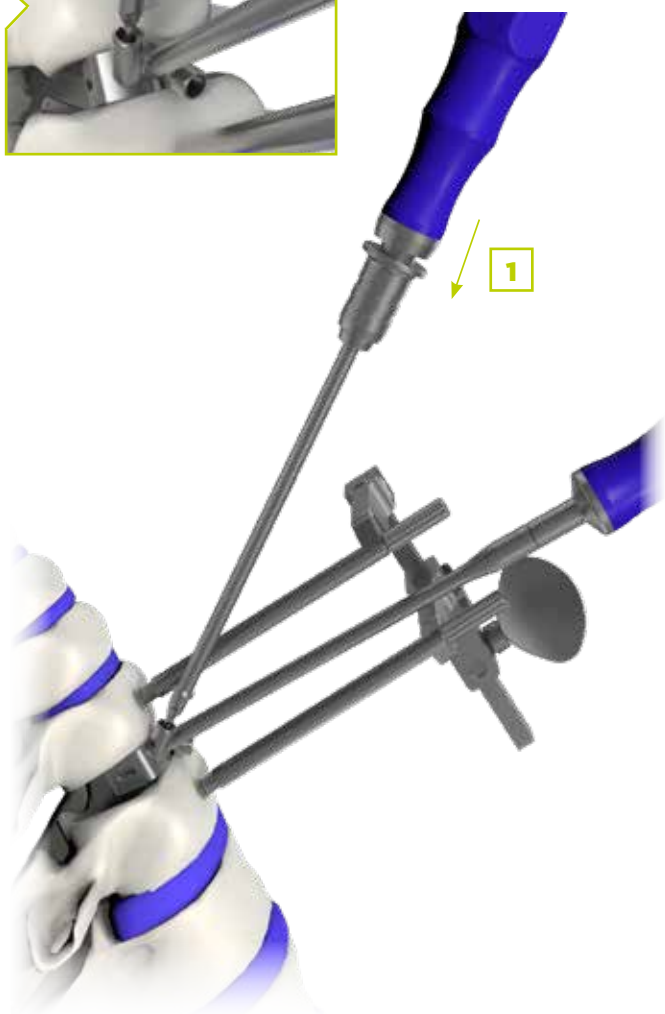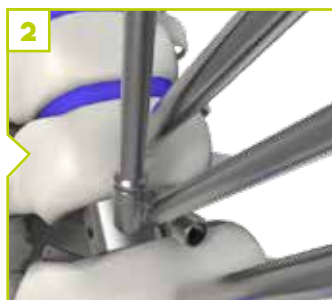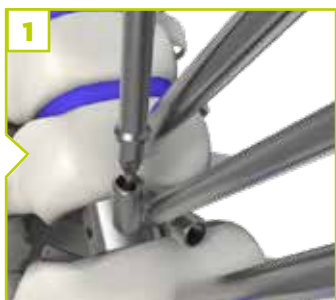



INSERÇÃO DO PARAFUSO



Bastão chave-de-fenda conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido limitador de torque
SD-ALSH26123PCAOTL13 + AC2-AO37



Bloco de Compactação de Enxerto em Cage Cervical Ti
AC2-AO20

..... OU



Chave-de-fenda angulada com manga conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido limitador de torque
SD-ALSH26123PCAOTL13 + AC2-AO35 + AC2-AO36

..... OU



Chave-de-fenda angulada com manga curta conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido limitador de torque
SD-ALSH26123PCAOTL13 + AC2-AO40 + AC2-AO41

O parafuso pode ser inserido usando o Bastão chave-de-fenda AC2-AO37, a Chave-de-fenda Angulada AC2-AO35 montada com a Manga para anclaje U AC2-AO36, ou a Chave-de-fenda curta Angulada AC2-AO40

montada com a Manga curta de anclaje U AC2-AO41, todos conectados ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido limitador de torque SD-ALSH26123PCAOTL13.

Os parafusos do Hexanium ACIF são fornecidos em embalagem esterilizada.

! ATENÇÃO !

As chaves de fenda DEVEM ser utilizadas com o limitador de torque (preto cabo). É proibido usar o cabo de engate rápido (cabo azul).



Diâmetro : 3.5 mm

Comprimento : 10 / 12 / 14 / 16 mm

Ref : AC2-SD35XXS (xx = Comprimento)



Diâmetro : 3.8 mm

Comprimento : 10 / 12 / 14 / 16 mm

Ref : AC2-SD38XXS (xx = Comprimento)

Os parafusos de Ø 3,8 destinam-se a ser usados em cirurgias de revisão.

! ATENÇÃO !

Preste atenção porque dependendo da pegada os parafusos podem sobressair (ou não) para além da margem posterior do cage


Pegada Pequena

Os parafusos 12mm ficam quase alinhados com a margem posterior do cage. Os parafusos mais longos irão sobressair




Pegada Média

Os parafusos 14mm ficam quase alinhados com a margem posterior do cage. Os parafusos mais longos irão sobressair.

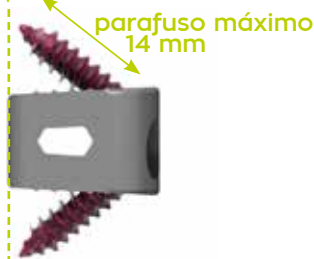

Pegada Grande

Os parafusos 16mm ficam quase alinhados com a margem posterior do cage.

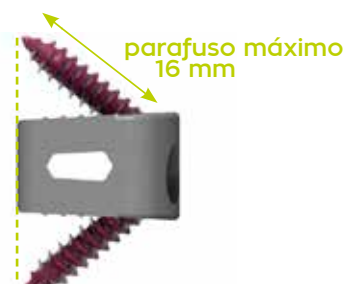


As Bastão chave-de-fenda [AC2-A037](#), a Chave-de-fenda Angulada [AC2-A035](#) ou a Chave-de-fenda curta Angulada [AC2-A040](#) apresentam uma ponta auto-retentora.

Antes de conectar o parafuso à chave de fenda, você pode colocar o parafuso dentro do local dedicado do **bloco de compactação de enxerto em cage cervical Ti** [AC2-A020](#). Em seguida, para conectar o parafuso com a chave-de-fenda use um movimento de «espetar e agarrar» e assegure que o parafuso está firmemente agarrado à chave-de-fenda.



Se usar a a chave de fenda angulada sem manga, preste atenção para segurar a chave-de-fenda pela parte angulada para evitar qualquer movimentação da ponta durante a ligação.

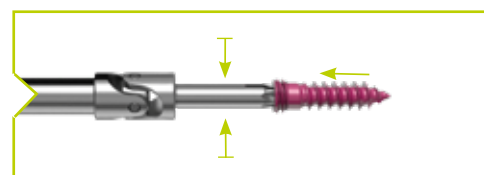


Uma vez conectados, deslize o parafuso e a ponta da chave-de-fenda através do guia e dentro do orifício preparado nos passos anteriores. Quando o parafuso chegar ao

osso, aparafuse no sentido horário para o inserir.

Use a **Cabo Cilíndrico de Engate Rápido limitador de torque** [SD-ALSH26123PCAOTL13](#) para o aperto final. gire em sentido horário até que faça 3 cliques.



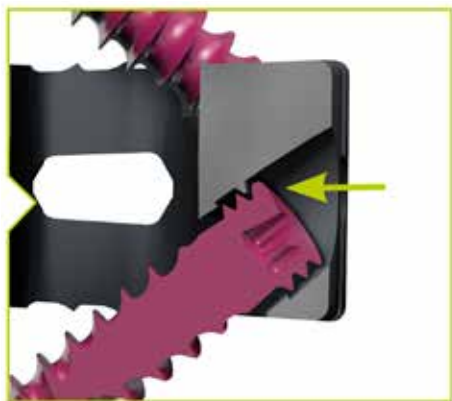

A rosca da cabeça do parafuso deve encaixar na rosca mais anterior da cage, que não deve ser visível ao remover a chave.

Repita os 3 passos anteriores no outro lado para inserir o segundo parafuso.

! ATENÇÃO !



O aperto final DEVE ser feito com o cabo limitador de torque (preto cabo).

XII

LIBERTAÇÃO FINAL


Para libertar o cage Hexanium ACIF quando ambos os parafusos estiverem colocados, rode o botão do bastão interno para segurador de cage cervical Ti no sentido

antihorário até o cage ficar livre **1** e o segurador de cage poder ser desconectado **2**.

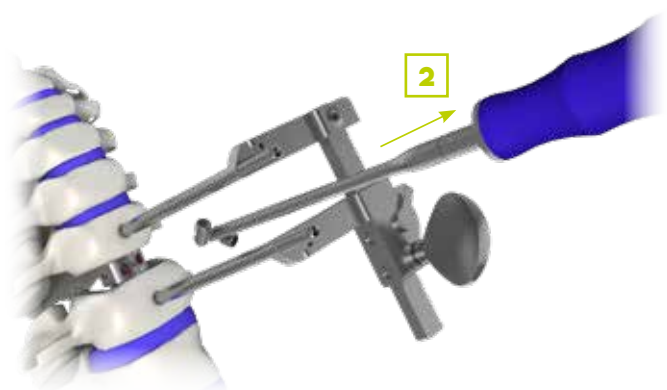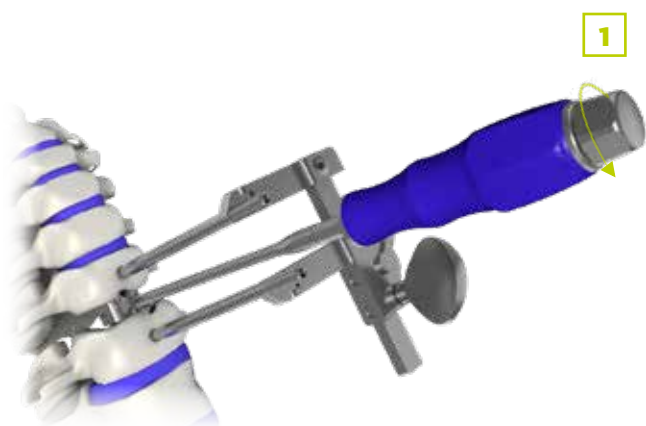

Para remover o distrator/compressor: primeiro, rode o **plug para pinos AC2-A210** no sentido anti-horário em cada um dos pinos para o remover.


Depois, deslize o braço do D/C para cima, ao longo dos pinos, até conseguir removê-lo completamente.

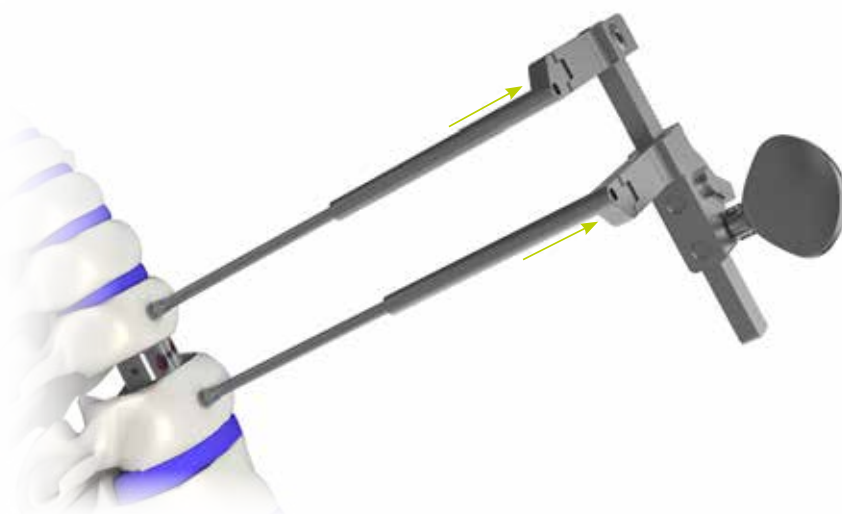

Chave para Pinos
AC2-A216

Para remover os pinos, volte a conectar a chave para pinos AC2-A216 de acordo com

o passo II e desaperte o pino até que se destaque do corpo vertebral. Repita este passo para o outro pino.

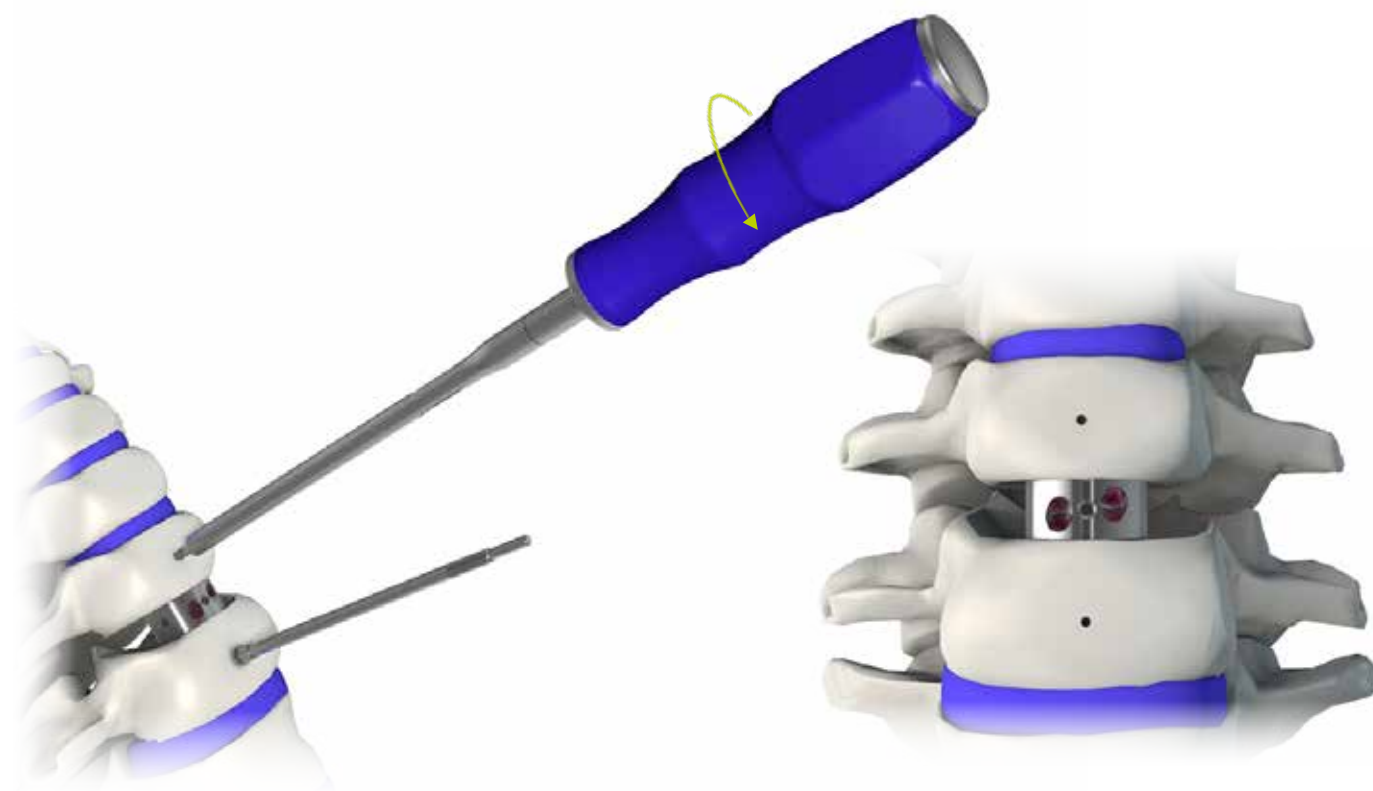



Bastão Interno para Segurador de
Cage Cervical Ti
AC2-A002



Segurador de Cage Cervical SA Ti com Guia
AC2-A001G-XX

..... OU



Segurador de Cage Cervical Ti
AC2-A001


..... OU



Segurador de Cage Cervical Ti Sem Trava
AC2-A003

Para remover o cage se necessário, conecte o segurador de cage cervical SA Ti com guia AC2-A001G-XX ou o segurador de cage cervical Ti AC2-A001 ou o segurador de cage cervical Ti sem trava AC2-A003 ao cage, inserindo a extremidade do segurador de cage na abertura da margem anterior do cage **1**.

Uma vez em posição, rode o botão do ibastão interno para segurador de cage cervical Ti AC2-A002 no sentido horário para enroscar o bastão interno na rosca do cage **2**.

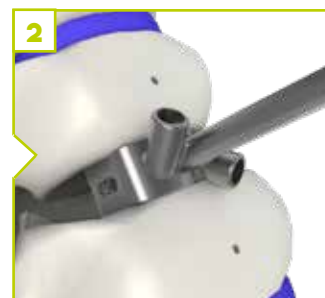



Bastão chave-de-fenda conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido
SD-ALSH26123PCAO + AC2-A037

..... OU



Chave-de-fenda angulada com manga conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido
SD-ALSH26123PCAO + AC2-A035 + AC2-A036


..... OU



Chave-de-fenda angulada com manga curta conectado ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido
SD-ALSH26123PCAO + AC2-A040 + AC2-A041


Conecte o Bastão chave-de-fenda **AC2-A037**, ou a Chave-de-fenda Angulada **AC2-A035**, ou a Chave-de-fenda curta Angulada **AC2-A040**, ao Cabo Cilíndrico de Engate Rápido **SD-ALSH26123PCAO** (veja os detalhes do passo anterior na página).

Quando o cage estiver firmemente preso, remova ambos os parafusos usando uma chave-de-fenda.

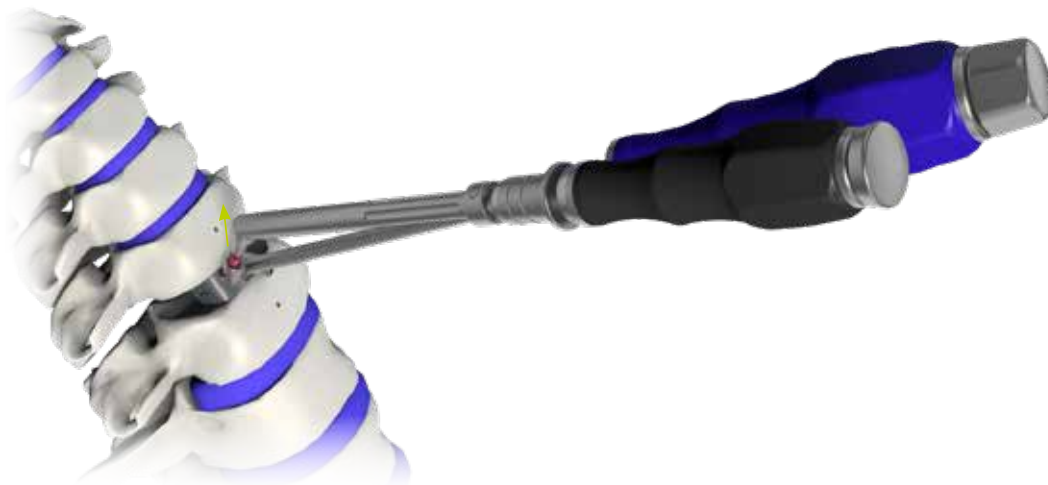



Martelo
AC2-A023


Para remover o Hexanium ACIF do espaço intervertebral após remover os parafusos, agarre no bastão do segurador de cage usando a abertura existente no **martelo AC2-A023**.

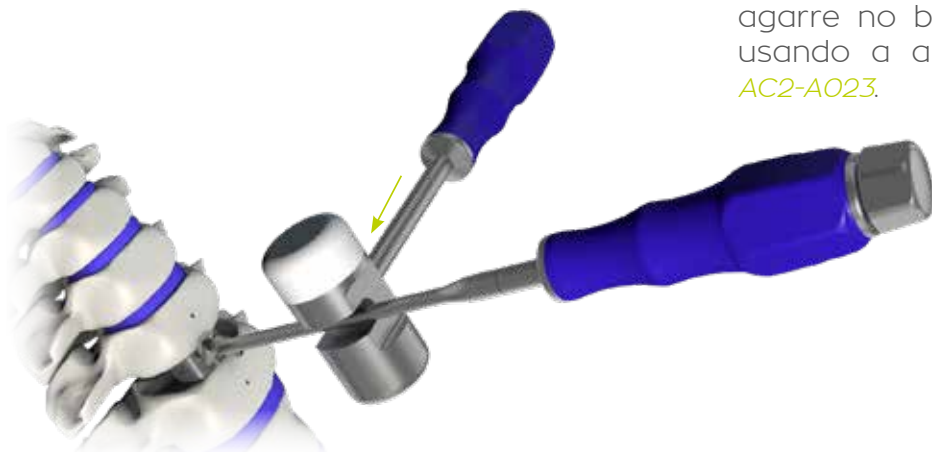

Uma vez em posição, puxe para cima com o martelo, aplicando uma força ascendente na direção do cabo do segurador de cage

e repita até o cage ser completamente removido.

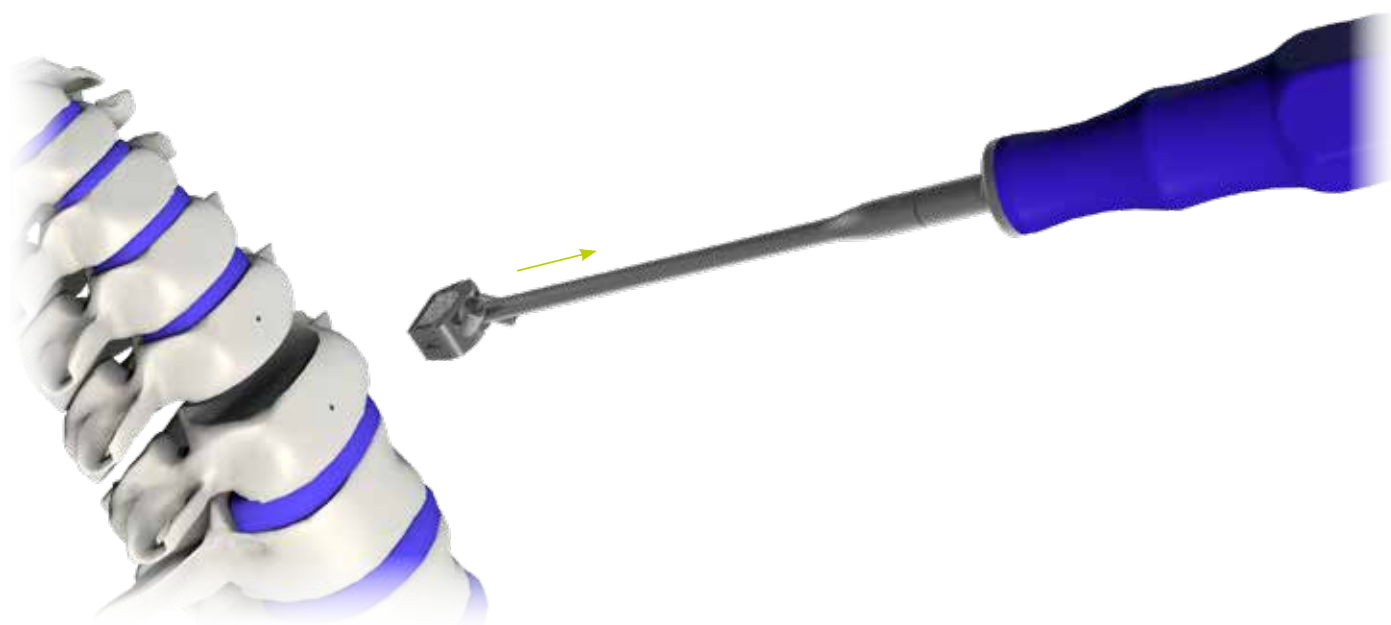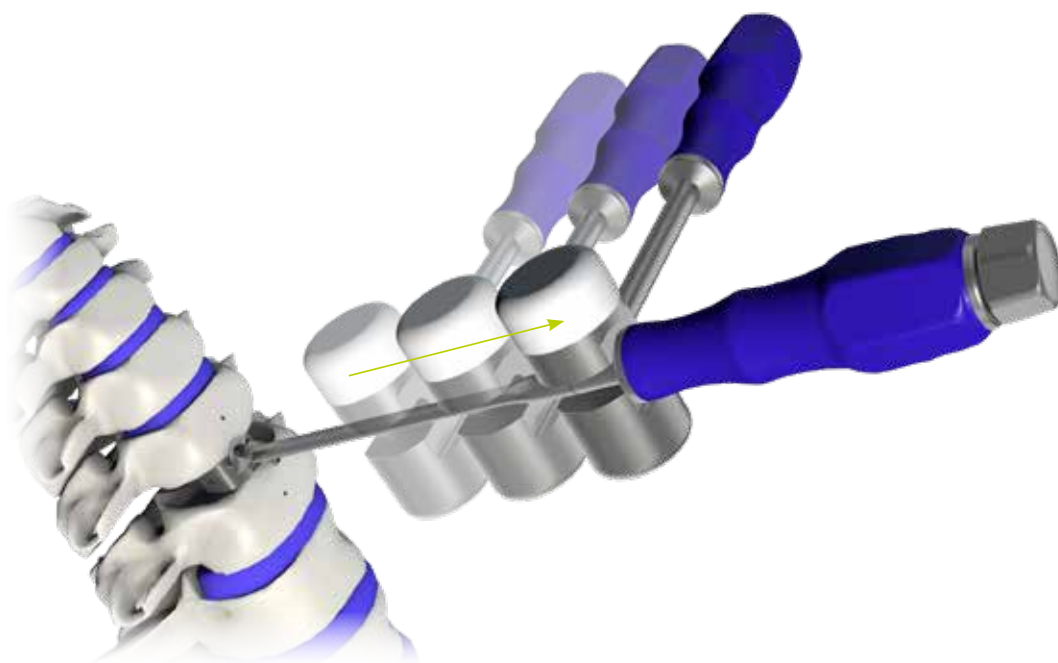

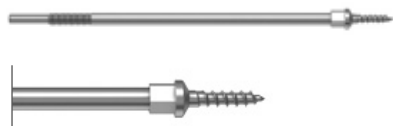

Pinos para
Distrator/Compressor

AC2-A206



Chave para Pinos

AC2-A216



Distrator/Compressor

AC2-A201



Plugues para Pinos

AC2-A210




Raspador

AC2-A010



Prova de Cage Cervical
Convexo ou Lordótico Ti

AC2-A011-XXXX

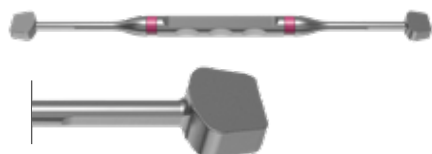

Prova de Cage Cervical
Convexo ou Lordótico Ti
Sem Trava

AC2-A012-XXXX



Martelo

AC2-AO23



Bastão Interno para
Segurador de Cage
Cervical Ti

AC2-AO02



Segurador de Cage
Cervical Ti

AC2-AO01



Segurador de Cage
Cervical Ti Sem Trava

AC2-AO03



Segurador de Cage
Cervical SA Ti com Guia

AC2-AO01G-XX



Bloco de Compactação
de Enxerto em Cage
Cervical Ti

AC2-AO20



Impactador de Osso
Esponjoso em Cage
Cervical Ti

AC2-AO21



Reposicionador de Cage
Cervical Ti

AC2-AO22



Cabo Cilíndrico de
Engate Rápido

SD-ALSH26123PCAO



Cabo Cilíndrico de Engate
Rápido limitador de
torque

SD-ALSH26123PCAOTL13



Sovela Óssea

AC2-AO30



Sovela Óssea Angulada

AC2-AO31



Sovela Curta Óssea
Angulada

AC2-AO38



Broca Reta

AC2-AO32



Broca Angulada

AC2-AO33



Broca Curta Angulada

AC2-AO39



Bastão chave-de-fenda

AC2-AO37



**Chave-de-fenda
Angulada**

AC2-AO35



Manga para anclaje U

AC2-AO36




**Chave-de-fenda Curta
Angulada**

AC2-AO40



Manga curta de anclaje U

AC2-AO41

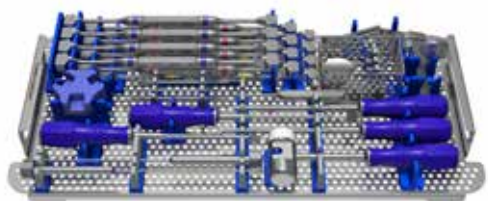

**Bandeja de Cages Cervicais
Padrão Ti**
AC2-TRAY111



Bandeja de Cages Cervicais SA Ti
AC2-TRAY112

Base Comum SV
SD-BASE11117

PARAFUSOS



Comprimento	Diâmetro: 3.5mm	Diâmetro: 3.8mm
10 mm	AC2-SD3510S	AC2-SD3810S
12 mm	AC2-SD3512S	AC2-SD3812S
14 mm	AC2-SD3514S	AC2-SD3814S
16 mm	AC2-SD3516S	AC2-SD3816S

CAGES

AC2-CSXXX


X = Tamanho Pequeno (S) / Médio (M) / Grande (L)

XX = Altura de 05 a 12 mm

X = CUNEIFORME (L) / CONVEXO (C)



CAGE CUNEIFORME

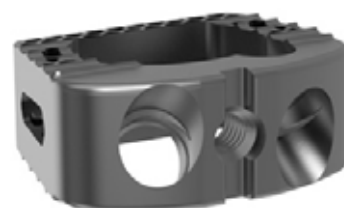

Altura	Cage Cuneiforme Pequeno 12 x 15 mm	Cage Cuneiforme Médio 14 x 17 mm	Cage Cuneiforme Grande 15 x 19 mm
05 mm	AC2-CSS05L	AC2-CSM05L	AC2-CSL05L
06 mm	AC2-CSS06L	AC2-CSM06L	AC2-CSL06L
07 mm	AC2-CSS07L	AC2-CSM07L	AC2-CSL07L
08 mm	AC2-CSS08L	AC2-CSM08L	AC2-CSL08L
09 mm	AC2-CSS09L	AC2-CSM09L	AC2-CSL09L
10 mm	AC2-CSS10L	AC2-CSM10L	AC2-CSL10L
11 mm	AC2-CSS11L	AC2-CSM11L	AC2-CSL11L
12 mm	AC2-CSS12L	AC2-CSM12L	AC2-CSL12L

PEGADAS DO HEXANIUM ACIF

Tamanho Comprimento x Largura


S Small 12 x 15 mm

M Medium 14 x 17 mm

L Large 15 x 19 mm



CAGE CONVEXO

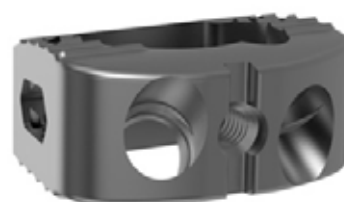

Altura	Cage Convexo Pequeno 12 x 15 mm	Cage Convexo Médio 14 x 17 mm	Cage Convexo Grande 15 x 19 mm
05 mm	AC2-CSS05C	AC2-CSM05C	AC2-CSL05C
06 mm	AC2-CSS06C	AC2-CSM06C	AC2-CSL06C
07 mm	AC2-CSS07C	AC2-CSM07C	AC2-CSL07C
08 mm	AC2-CSS08C	AC2-CSM08C	AC2-CSL08C
09 mm	AC2-CSS09C	AC2-CSM09C	AC2-CSL09C
10 mm	AC2-CSS10C	AC2-CSM10C	AC2-CSL10C
11 mm	AC2-CSS11C	AC2-CSM11C	AC2-CSL11C
12 mm	AC2-CSS12C	AC2-CSM12C	AC2-CSL12C

A notebook page with a blue header containing the word 'NOTAS' in white capital letters. Below the header is a large white area with horizontal blue lines for writing. The page is numbered '31' in the bottom right corner, and the footer contains the text 'Hexanium ACIF' followed by a logo and the word 'NOTAS'.

NOTAS

NOTAS

SPINEVISION

INNOVATION THAT MATTERS

Distribuído por



SPINEVISION SAS
3 Rue de la Renaissance
92160 ANTONY - FRANCE
Tel : +33 1 53 33 25 25

www.spinevision.net



CE 0123 CE 2460

Consulte o encarte da
embalagem para saber mais
sobre limitação de rotulagem.

Documento não contratual
AC2-STG01-BR-2025A

O sistema Hexanium ACIF é composto por dispositivos médicos. Por favor consulte as instruções de uso, ou, se aplicável, a etiqueta específica de cada dispositivo para mais informação. Exceto em caso de informação contrária, a técnica cirúrgica aplicável ao produto é a versão atual disponível no site do fabricante. O formato impresso gratuito da técnica cirúrgica está disponível mediante solicitação pelo e-mail jfurequest@spinevision.com